



SGP

REPRESENTACIONES DEL VALLE S.A. de C.V.

Ayuntamiento 110, Int. 103; Villa de Coyoacan, C.P. 04000, Coyoacan, México D.F. – Tel.:(55) 5659-7100

PROTOCOLO PARA ULTRACAVITACION COM CAVITACELL MEGA + RadioFrecuencia

Protocolo de Ultracavitacion:

Recomendaciones:

- Tomar un litro de agua antes de cada sesión.
- Aplicación de CAVITACELL MEGA debajo de las costillas y en la espalda, solamente donde se halle tejido adiposo, aplicación por zona en cuadrantes de 10 cm. de diámetro por espacio de 10 minutos.

Consideraciones Generales:

1. Valoración.
2. Limpieza de la zona a tratar.
3. Utilizar gel conductor incoloro.
4. Aplicación de CAVITACELL MEGA + R.F.
5. Hacer drenaje linfático (manual, con vacuum DERMOCELL ó con electroestimulación DERMOCELL).
6. Tomar de medidas antes de cada sesión.
7. Posteriormente aplicar RadioFrecuencia Monopolar DERMOCELL, durante 10 minutos de acuerdo al grado de flacidez, programar en 60 ciclos por segundo.
8. Tomar agua diariamente.

NO SE DEBE APLICAR CARBOXITERAPIA NI MANTA TERMICA